



adjust leg extensions
to appropriate height

ajustar las extensiones de las
piernas a la altura apropiada

Usar como soporte de seguridad para el inodoro



O en el fregadero



set bathroom safety rail around toilet as shown; or use for balance at sink:
assure floor is dry when using

Colocar el soporte de seguridad alrededor del inodoro como en la ilustración; o utilizarlo para
mantener el equilibrio cuando se use el fregadero: asegurarse de que el piso está seco durante su uso.

Carex[®]
caring for you



B660-00

Parts List | Lista de piezas

frame
soporte

legs & extensions x4
patas y extensión

c-clips x4
sujetador en forma de C

bolt, wing nut &
plastic washer x4
perno, tuerca mariposa y
arandela plástica



Carex Health Brands


PO Box 2526 • Sioux Falls, SD 57101-2526
Phone: 800-328-2935 • Fax: 888-616-4297
www.carex.com



Carex Health Brands


All Rights Reserved
© 2011 Carex Health Brands
40-B369-00_00

remove all packaging material
unfold and open top frame

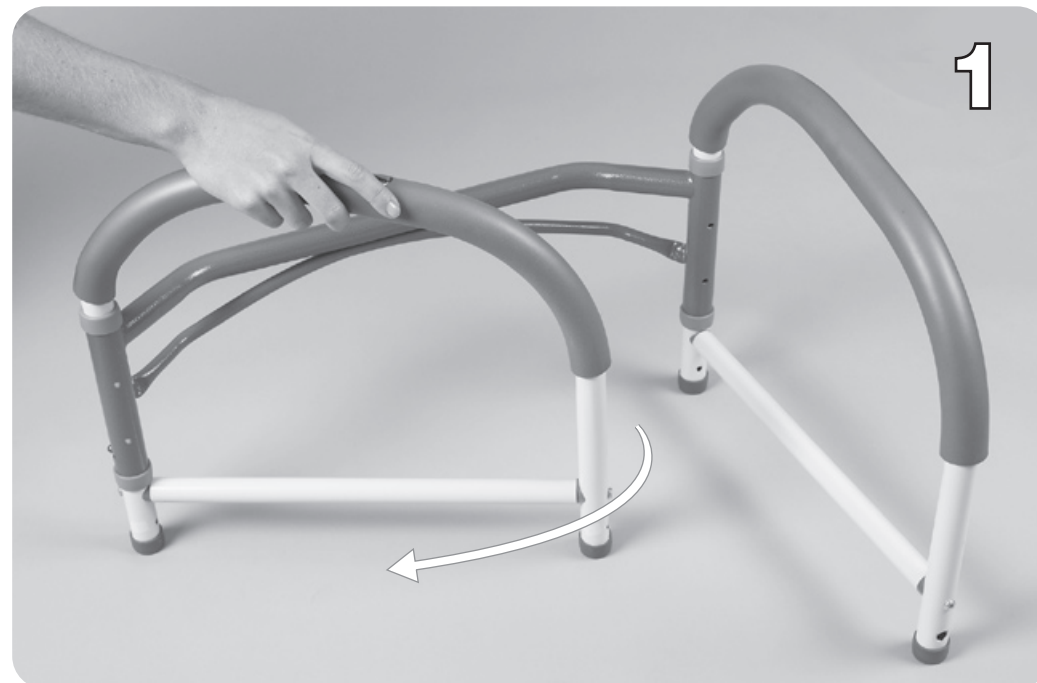


retirar todo el material de embalaje
desdoblar y abrir el soporte superior


secure frame by inserting all c-clips

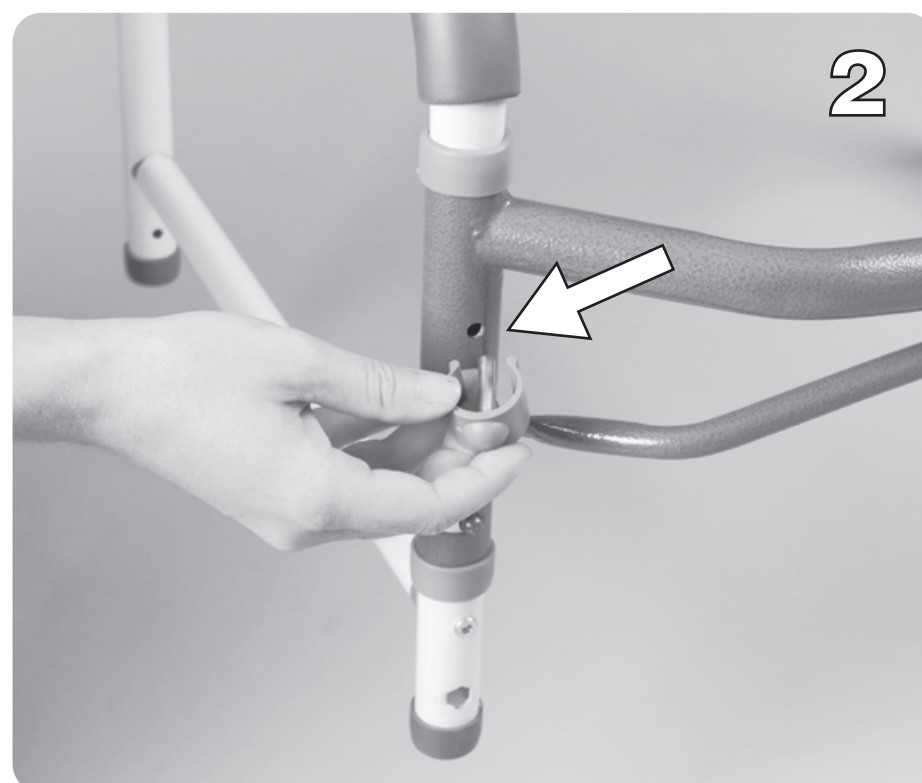

insertar los sujetadores en forma de C para sujetar el soporte

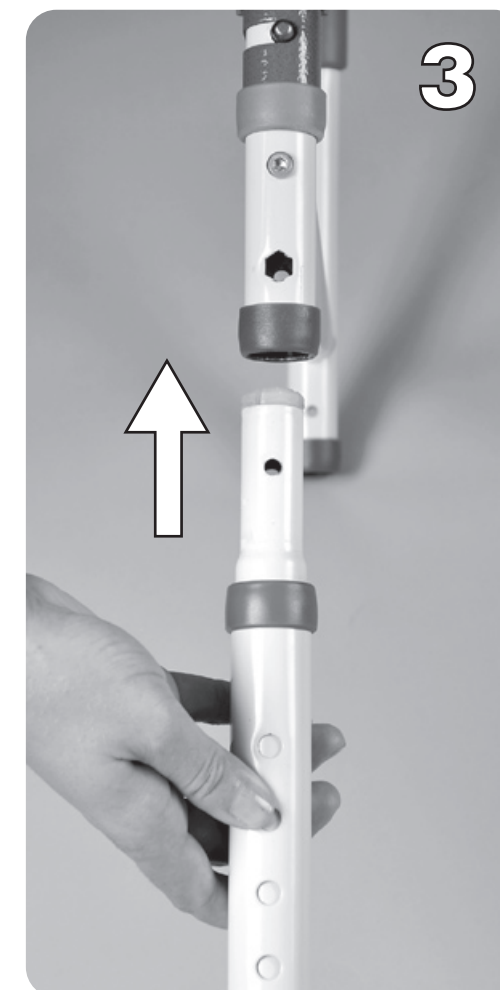

assemble legs
montar las piernas

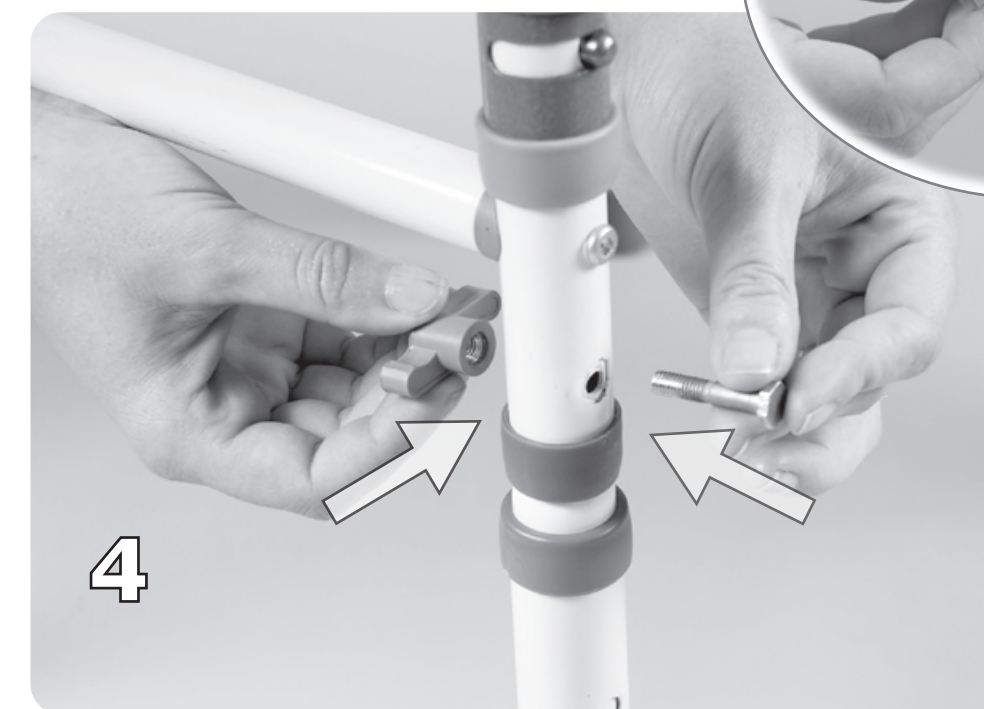

secure legs with
bolt, plastic washer
and tighten with gray
wing nut

sujetar las piernas con los
pernos y las arandelas
plásticas; apretarlos con
las tuercas mariposa grises

