


GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

PÁGINA 1



El propósito de esta guía es ayudarlo a utilizar correctamente su unidad TENS 7000™. No utilice este dispositivo para síntomas de dolor no diagnosticados sin antes consultar a un médico. Esta guía no pretende reemplazar ni sustituir el Manual de instrucciones del dispositivo TENS 7000™.

LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES EN SU TOTALIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO. Lea, comprenda y conozca las contraindicaciones, las advertencias, las precauciones y las instrucciones de funcionamiento que se encuentran en las páginas 4 y 5 de su Manual de instrucciones. Siga siempre las instrucciones de funcionamiento como se indican en el Manual.

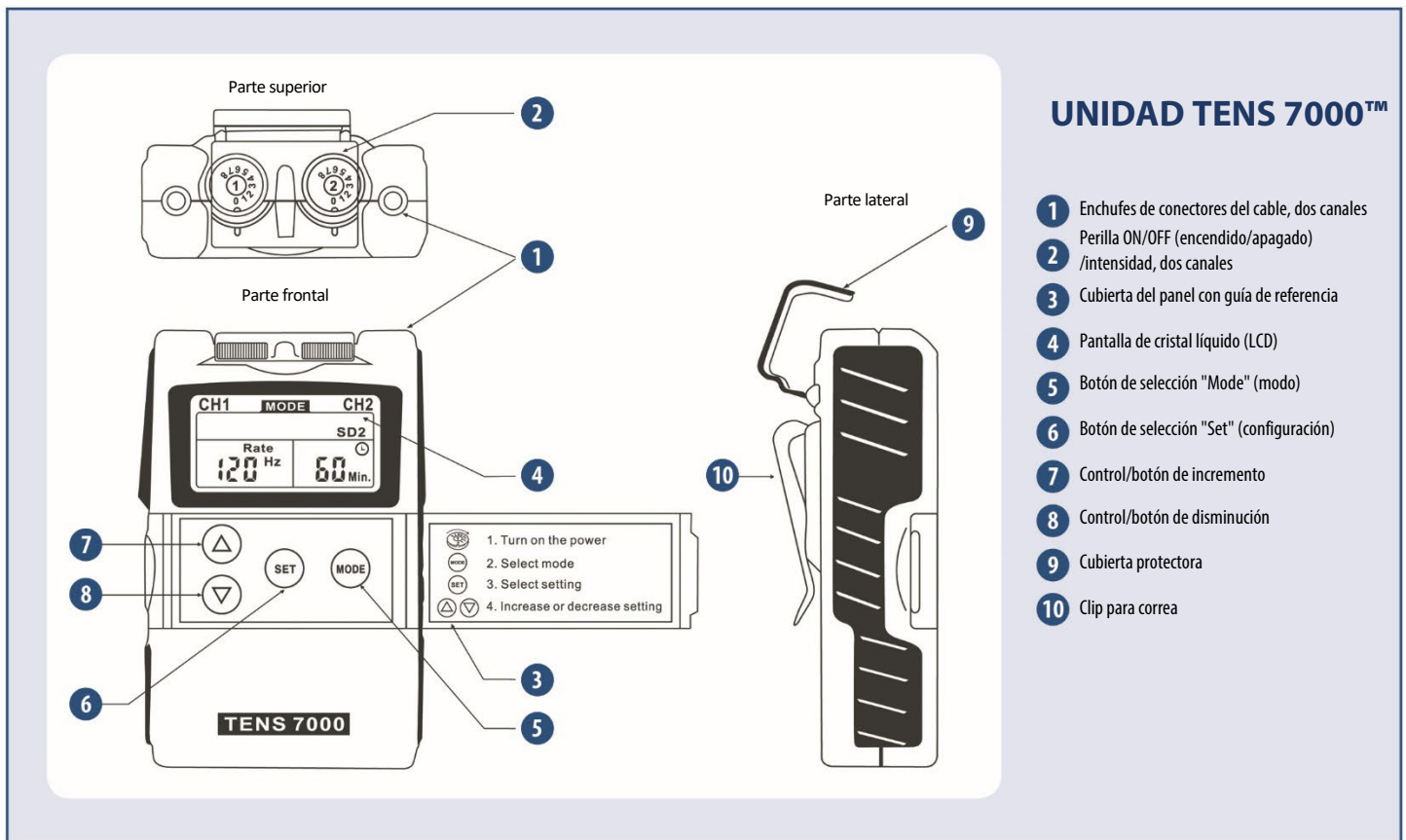

UNIDAD TENS 7000™

- 1 Enchufes de conectores del cable, dos canales
- 2 Perilla ON/OFF (encendido/apagado) /intensidad, dos canales
- 3 Cubierta del panel con guía de referencia
- 4 Pantalla de cristal líquido (LCD)
- 5 Botón de selección "Mode" (modo)
- 6 Botón de selección "Set" (configuración)
- 7 Control/botón de incremento
- 8 Control/botón de disminución
- 9 Cubierta protectora
- 10 Clip para correa



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

La colocación de los electrodos puede ser uno de los parámetros más importantes para lograr el éxito con la terapia TENS. Si los primeros resultados no son positivos, hable con su médico para buscar alternativas en las configuraciones de estimulación o colocación de los electrodos. Una vez que se logren los resultados deseados, marque las áreas de los electrodos y las configuraciones para futuras referencias. El dispositivo TENS 7000™ cuenta con dos cubiertas protectoras que evitan cambios no intencionales en la configuración.

Encienda el dispositivo girando la perilla en sentido horario y seleccione el nivel de intensidad deseado. **Apague el dispositivo** girando la perilla en sentido antihorario hasta 0.

El **indicador de batería baja**  señala cuando la batería está baja. Reemplace la batería cuando la estimulación se sienta más débil.

INSERTE LA BATERÍA

Presione la flecha y deslice la tapa del compartimento de la batería para abrirla. Inserte la batería de 9 V* haciendo coincidir los extremos + y - con los de la unidad.



La batería debe colocarse encima de la cinta del compartimento para permitir una fácil extracción de la batería.


*La batería incluida está diseñada para ser una batería de arranque. Esta batería solo dura de 30 minutos a una hora antes de que sea necesario su reemplazo.



IMPORTANTE

Los pasos 1 a 3 deben realizarse con el dispositivo apagado (posición OFF). Una vez que la unidad se haya encendido (posición ON), no quite la correa sin antes apagar el dispositivo (posición OFF).

1 CONECTAR LOS CABLES CONDUCTORES A LOS ELECTRODOS

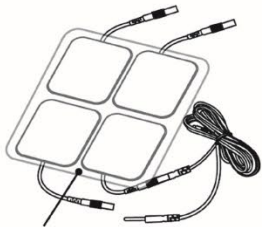


Inserte firmemente el extremo del pin del cable conductor en los conectores de los electrodos.


Asegúrese de que la conexión esté completa y que no quede expuesto el metal de los pines.

2 CONECTAR LOS CABLES CONDUCTORES AL DISPOSITIVO

Seleccione uno de los dos canales disponibles e inserte el cable conductor firmemente en el enchufe.

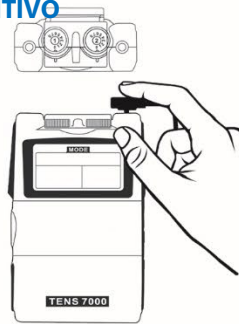

3 COLOCAR LOS ELECTRODOS SOBRE LA PIEL

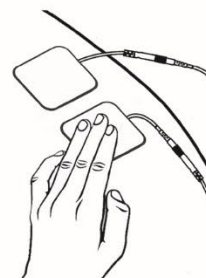


Retire la protección posterior de los electrodos. Conserve la protección posterior para almacenar correctamente los electrodos después de su uso.

Antes de aplicar los electrodos, asegúrese de que la piel del área de aplicación esté limpia y seca.

Consulte la **Guía de colocación de los electrodos** para obtener más información.


4 ENCENDER EL DISPOSITIVO Y SELECCIONAR LA INTENSIDAD

Al girar los controles en sentido horario, el canal adecuado se enciende y el indicador de potencia (CH1 y CH2) aparece en la pantalla LCD.

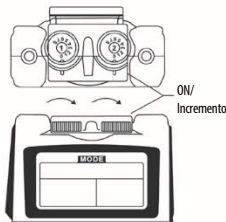


La salida de estimulación aumentará a medida que se gire la perilla en sentido horario o hacia un número mayor.
1 = Más débil 8 = Más fuerte

5 SELECCIONAR EL MODO DE TERAPIA

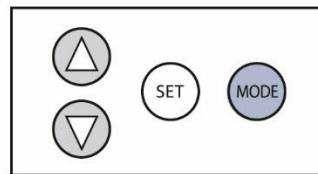


Hay cinco modos disponibles: **Ráfaga, Normal, Modulación, SD1 y SD2**. Presione el botón MODE (modo) y continúe presionando hasta alcanzar la configuración deseada.

6 SELECCIONAR EL ANCHO DE PULSO

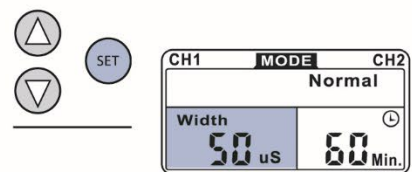


El ancho de pulso se ajusta de 50 a 300 μ s. Presione el botón SET para ingresar a este menú; luego presione los botones \blacktriangle y \blacktriangledown para regular la configuración. A menos que se indique lo contrario, se sugiere un ajuste de 70 a 120 μ s.

7 SELECCIONAR LA FRECUENCIA DE PULSO

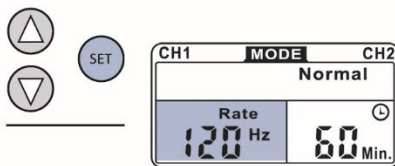

La frecuencia de pulso se regula de 2 Hz a 150 Hz. Presione el botón SET para ingresar a este menú; luego presione los botones \blacktriangle y \blacktriangledown para regular la configuración. A menos que se indique lo contrario, se sugiere una configuración de 70-120 Hz.

8 CONFIGURAR EL TEMPORIZADOR

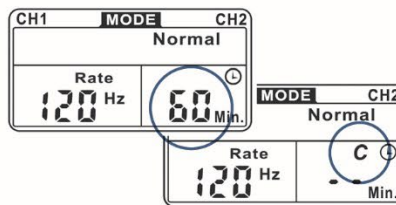

El tiempo de tratamiento es regulable de uno a 60 minutos o se puede colocar en el modo Continuo (C). Pulse los botones \blacktriangle y \blacktriangledown para regular la configuración. Su configuración se almacenará de forma permanente a menos que se ajuste de nuevo.

MEDIDOR DE CUMPLIMIENTO

Esta unidad puede almacenar 60 configuraciones de registros de operación. El tiempo total de tratamiento puede almacenar hasta 999 horas.

Para **verificar o eliminar registros individuales**, presione el botón MODE mientras enciende el dispositivo. La pantalla LCD mostrará la cantidad de registros y el tiempo de operación. Pulse los botones \blacktriangle y \blacktriangledown para comprobar cada registro.

Para eliminar un registro, mantenga presionado el botón SET durante tres segundos.

Para **verificar o eliminar el registro acumulativo**, presione el botón MODE y cambiará a esta configuración. Presione primero el botón SET; luego presione MODE y manténgalo presionado durante tres segundos: todos los registros se eliminarán y se escuchará un sonido de alarma.