

## Introduction

Merci d'avoir choisi le tapis de chute Meridian Medical. Ce produit peut aider à réduire la gravité des blessures découlant de chutes lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions. La réduction de l'impact varie en fonction de la surface du sol sur laquelle le tapis est placé, du poids du patient et d'autres facteurs possibles. Avant d'utiliser le matelas, veiller à attendre 24 heures pour que le tapis de chute s'aplanisse complètement. Au moment de le déballer, le tapis de chute peut dégager une légère odeur, qui se dissipera en quelques jours.

## Indication thérapeutique

Un tapis de chute se place au chevet du patient pour diminuer l'impact et réduire le risque de blessure s'il sort du lit sans accompagnement et tombe.

**⚠ AVERTISSEMENT : NE PAS ESSAYER D'UTILISER LE TAPIS DE CHUTE SANS AVOIR LU ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.**

## Contre-indications

Il n'existe aucune contre-indication relative à l'utilisation de ce produit.

## Mode d'emploi

Le tapis de chute doit être placé sur le côté du lit par lequel le patient sort et **NE DOIT** être installé qu'une fois que le patient se trouve dans le lit. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le tapis de chute doit être rangé en toute sécurité dans un endroit où il ne crée pas de danger (par exemple, lorsque le patient est debout et se déplace). La réduction de l'impact varie en fonction de la surface du sol sur laquelle le tapis de chute est placé, du poids du patient et d'autres facteurs potentiels.

## Nettoyage et entretien

- Le tapis de chute résiste à de nombreux types de produits chimiques et au contact immédiat avec l'humidité. Un entretien adéquat contribuera à accroître la longévité de ce tapis. Le séchage à l'air est la méthode de séchage recommandée.
- **Désinfection** : entre chaque patient ou si nécessaire, appliquer de l'alcool à friction (alcool isopropylique) sur la surface du tapis de chute à l'aide d'une serviette en papier ou d'un chiffon doux. Laisser le tapis de chute sécher complètement à l'air libre avant de l'utiliser.
- **Nettoyage de la surface** : si nécessaire, utiliser une serviette en papier ou un chiffon doux pour nettoyer le tapis avec un détergent ou un savon doux et de l'eau tiède. Veiller à éliminer **TOUS** les résidus de savon et à laisser le tapis de chute sécher complètement à l'air libre avant de l'utiliser. Si nécessaire, éliminer l'excès d'eau rapidement à l'aide d'un chiffon absorbant doux.
- Manipuler le tapis de chute avec précaution. S'abstenir de le traîner ou de le tirer pour éviter de l'endommager.

## ⚠ AVERTISSEMENTS

Compass Health Brands Corp. n'assume aucune responsabilité pour tout dommage ou préjudice si ce produit n'a pas été installé, assemblé ou utilisé adéquatement.

- Le tapis de chute peut nécessiter quelques jours pour s'aplanir complètement en fonction de la surface du sol et de la température ambiante de la pièce. Au moment de le déballer, il peut présenter des plis, qui s'atténueront avec le temps. Cela n'affecte en rien le rendement du tapis.
- Si le tapis de chute n'est pas rangé, les patients qui souffrent de troubles de l'équilibre ou d'une perte de sensibilité des membres inférieurs s'exposent à un plus grand risque de chute s'ils se tiennent debout sur le tapis. Il est important de ranger le tapis de chute si vous vous apprêtez à aider le patient à se lever ou à se déplacer.
- Le tapis de chute peut constituer un risque de trébuchement. **TOUJOURS** faire preuve de prudence au moment de monter sur le tapis de chute et d'en descendre. Pour éviter tout risque de trébuchement, vérifier que les bords du tapis de chute ne sont pas recourbés. Le cas échéant, **NE PAS L'UTILISER.**

## **TAPIS DE CHUTE MERIDIAN MEDICAL**

N° d'article : FM7220

CUP : 8 15067 07442 6



**MERIDIAN**  
MEDICAL™

- N'utiliser le tapis de chute **QUE** lorsque le patient est au lit.
- **NE PAS** laisser le tapis de chute à côté du lit si personne n'est dans le lit.
- Ne **JAMAIS** faire rouler d'appareils roulants sur le tapis de chute, notamment les fauteuils roulants, les fauteuils de transport, les déambulateurs ou les lève-patients. Cela pourrait endommager le tapis de chute ou rendre l'appareil à roues instable.
- Ne **JAMAIS** utiliser de chaleur directe (>120 °F) pour sécher le tapis de chute. Le séchage à l'air est la méthode de séchage recommandée.
- **TENIR** ce produit à l'écart des produits chimiques corrosifs et des sources inflammables.
- **NE PAS** exposer ce produit à la lumière directe du soleil.

### **AVERTISSEMENTS (suite)**

- **NE PAS** tremper ce produit dans l'eau.
- **NE PAS** laisser d'objets lourds ou durs sur le tapis de chute.
- **NE PAS** utiliser le produit s'il est endommagé.

### **MISES EN GARDE**

- Au moment de le déballer, le tapis de chute pourrait dégager une légère odeur, qui se dissipera en quelques jours.
- Le tapis de chute peut être glissant lorsqu'il est mouillé. Ne **JAMAIS** utiliser ou placer le tapis de chute sur un plancher à moins que le tapis **ET** le plancher ne soient complètement secs.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser le tapis de chute dans des zones ou des environnements constamment humides ou dans lesquels il risque d'être régulièrement mouillé. Le tapis de chute a une surface moelleuse qui peut retenir une fine couche d'eau, ce qui rend la surface glissante.
- Le tapis de chute doit être retiré lorsque le patient se déplace intentionnellement pour éviter qu'il ne contribue à l'instabilité du patient ou qu'il ne constitue un risque de trébuchement.

### **Spécifications**

Longueur :	72 po (+/- 0,5 po)	Largeur :	20 po (+/- 0,5 po)
Dureté :	Shore C 28 +/-5	Densité :	0,2 g – 0,23 g/cm <sup>3</sup>
Hauteur :	0,75 po (+/- 0,04 po)		

### **Garantie limitée**

Compass Health Brands Corp. garantit ce produit contre les défauts de fabrication pendant 12 mois. Tout défaut d'utilisation et d'entretien du tapis de chute Meridian Medical conformément aux instructions annulera cette garantie. L'usure normale découlant de son utilisation ou d'un abus n'est pas couverte.

### **Fabriqué pour :**

Compass Health Brands Corp.  
6753 Engle Road,  
Middleburg Heights, Ohio 44130  
Tél. : 800 376-7263

[www.compasshealthbrands.com](http://www.compasshealthbrands.com)

**CONSERVER CES INSTRUCTIONS**