



**Mobility & Comfort for
your active lifestyle**

**Movilidad y Confort para
tu estilo de vida activo**



ProBasics™ Aluminum Height Adjustable Rollator

8" Wheels



- ⚠ WARNING:** Read ALL warnings and instructions on enclosed insert prior to operating device.
- ⚠ ADVERTENCIA:** Lea TODAS las advertencias e instrucciones en el inserto adjunto antes de operar el dispositivo.


Save these instructions
Guarde estas instrucciones



COMPASSHEALTH 42-A22300_07 © 2019


Manufactured for / Fabricado por: Compass Health Brands Corp.
Middleburg Heights, OH 44130 • www.compasshealthbrands.com
Phone / Teléfono 800.376.7263 • Made in China / Hecho en China

5 Adjusting the Handles & Seat Height Ajustando las asas y la altura del asiento

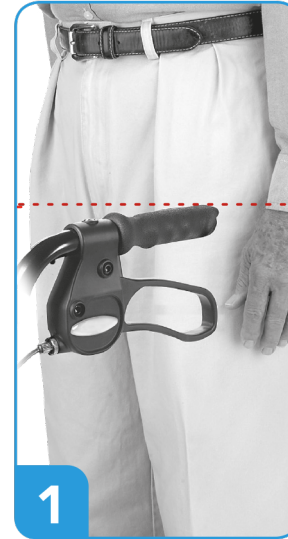


TIP: Adjust Seat height first – then adjust handle height.
SUGERENCIA: Primero ajuste la altura del asiento y luego ajuste la altura de la manija/agarradera.

NOTE: Seat height adjustment for all four wheels.
NOTA: Ajuste de altura del asiento para las cuatro ruedas.

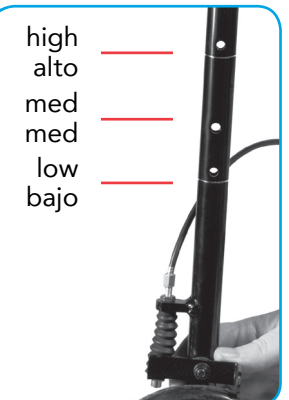

4 Backrest Assembly & Braking System Conjunto de respaldo y sistema de frenos

1 Check Parts Revisar partes

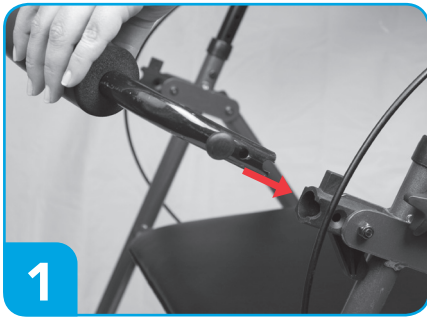

1

Push in side buttons and insert backrest. Flip up backrest for compact storage.

Presione los botones laterales e inserte el respaldo. Voltrear hacia arriba el respaldo para un almacenamiento compacto.



2

Using the brakes / Usando los frenos



Pull up to apply brakes.
Tire hacia arriba para aplicar los frenos.




Release brakes.
Soltar los frenos.




Push down to lock brakes.
Empuje hacia abajo para bloquear los frenos.

NOTE: Cable needs to be placed outside seating area and frames.
NOTA: El cable debe colocarse fuera de la zona de asientos y los marcos.

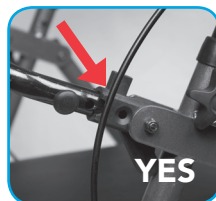

YES

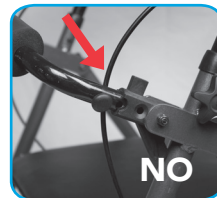


NO

Rolling walker frame
Cuadro de Andador



Handles with brake assembly
Asas con montaje de freno

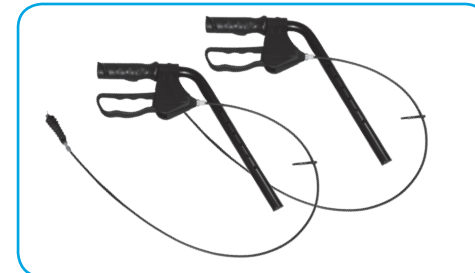


Backrest
Respaldo



Rear wheels
Ruedas traseras



Front wheels
Ruedas frontales

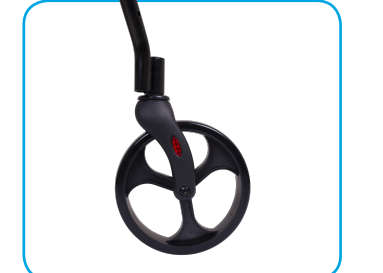

4 Height Adjustment
Knobs for Legs
Perillas de ajuste
de altura para
piernas



2 Height Adjustment
Knobs for Arms
Perillas de ajuste
de altura para
brazos



Note: Actual items may vary slightly from what is shown.
Nota: Los artículos reales pueden variar ligeramente de lo que se muestra.

2 Handle Assembly Asa de montaje




1

NOTE: Cable should be outside frame.
NOTA: El cable debe estar fuera del marco.

NOTE: The height adjustment knob should be fitted into the receptacle. Turn until fully tightened.
NOTA: La perilla de ajuste de altura debe colocarse en el receptáculo. Gire hasta que esté completamente apretado.



2

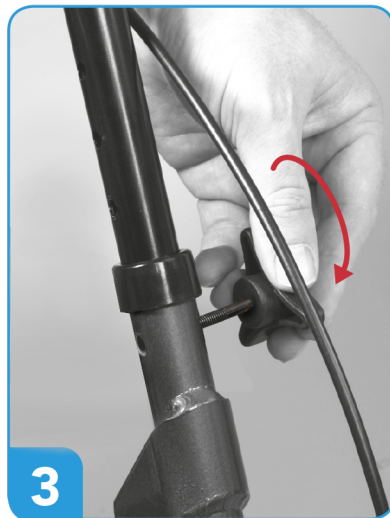

3




4

3 Front & Rear Wheel Assembly Montaje de rueda delantera y trasera



1

NOTE: Replace wheels every 18 months or when they are visibly worn.
NOTA: Reemplace las ruedas cada 60 millas recorridas o cuando estén visiblemente desgastadas.

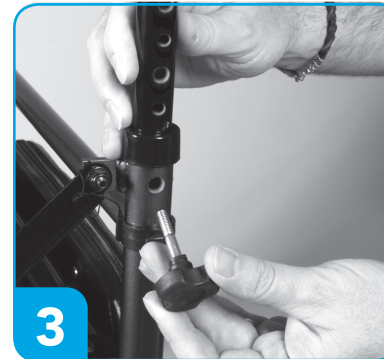

3

Hand screw in large hole.
Tornillo de mano en agujero grande.



2

The legs attach in two different ways:
1. Move height adjustment setting to desired detent button setting.
2. For increased fixation, screw in the height adjustment knob in the leg setting (they will automatically line up).
Las piernas se unen de dos formas diferentes:
1. Mueva la configuración de ajuste de altura a la configuración deseada del botón de retención.
2. Para una mayor fijación, atornille la perilla de ajuste de altura en el ajuste de la pierna (se alinearán automáticamente).



4